

fridababy®

3v1 | ZVLHČOVAČ VZDUCHU

+ DIFUZÉR + NOČNÍ SVĚTLO

MANUÁL K POUŽITÍ





fridababy



fridababy®

1
>
3

ZVLHČOVAČ VZDUCHU

+ DIFUZÉR + NOČNÍ SVĚTLO

Breathe Frida 3 v 1 funguje jako zvlhčovač, aroma difuzér a zklidňující noční světlo. Přidejte několik kapek éterického oleje a dopřejte svým maličkým klidný spánek.


**MLHA.
DÝCHAT.
SPÁT.
OPAKOVAT.**



OBSAH

SPECIFIKACE	6
FUNKCE	7
UPOZORNĚNÍ	8
INSTRUKCE	10
ČIŠTĚNÍ	12
INFORMACE O POUŽITÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ	13
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	14

SPECIFIKACE:

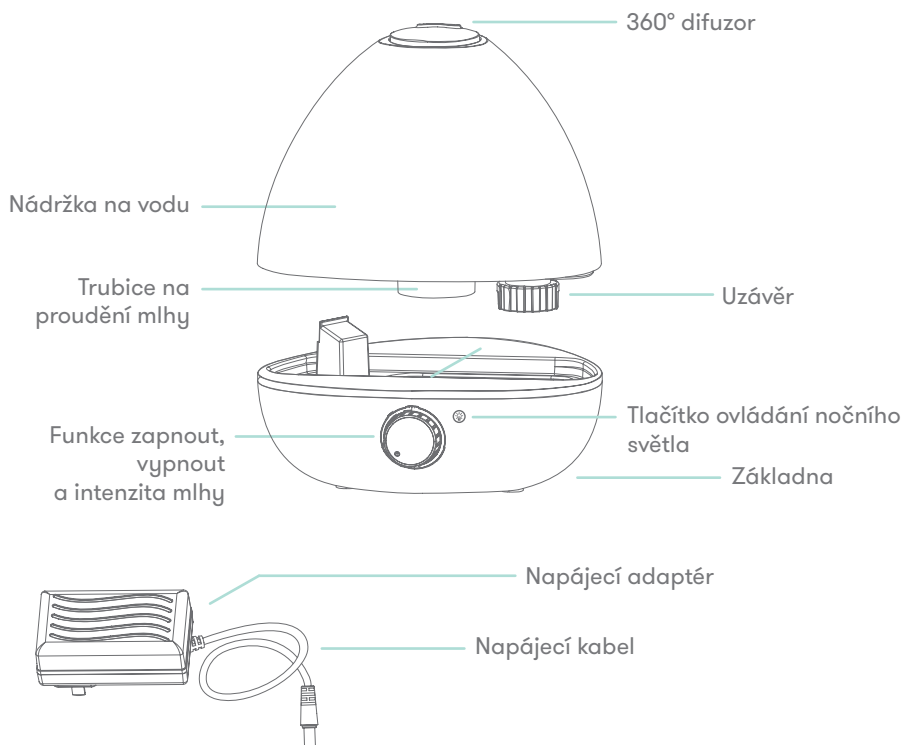

TECHNICKÁ DATA:

Název produktu: Breathe Frida 3 v 1: zvlhčovač vzduchu + difuzér + noční světlo

Číslo modelu: FB9080

Vstupní napětí: 24 VDC, 0,5 A

Objem vodní nádržky: 0,5 gal

Výkon: 12 W.

Rozměry: 196×201×200 mm

Pokrytí: 30 m²

Používejte pouze s napájecím adaptérem od výrobce.

FUNKCE:



ZVLHČOVAČ – Využívá sílu ultrazvukových vibrací k přeměně vody na chladnou hydratační mlhu, která proudí až 12 hodin. Vytváří příjemné prostředí jako byste byli u řeky, jezera nebo u moře.



AROMATERAPIE – Pokud přidáte několik kapek kvalitního aromaterapeutického oleje, dopřejete svým maličkým klidný spánek.



NOČNÍ SVĚTLO MĚNÍCÍ BARVY – Můžete si zvolit odstín světla dle nálady a oblíbenosti.



FUNKCE AUTOMATICKÉHO ZASTAVENÍ – Bezpečně se vypne, pokud dojde voda nebo je odstraněna nádržka.



NASTAVENÍ MLHY – Otočením ovladače nastavíte intenzitu mlhy.

UPOZORNĚNÍ:

DODRŽUJTE TYTO POKYNY:

Nedodržení níže uvedených varování může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné zranění. Tento produkt by měl být používán pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v této příručce. Jiné použití než zde uvedené, může mít za následek vážné zranění.

POZOR:

- Nebezpečí uškrcení – uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely.
- Demontáž nebo oprava neoprávněnou osobou může mít za následek vážné poškození a zrušení nároku na záruku od výrobce.
- Zvlhčovač vždy umístěte na rovný povrch, nerovnoměrný povrch ovlivňuje správnou funkčnost výrobku.
- Zvlhčovač nepokládejte na savé a látkové povrchy, koberce apod., které mohou blokovat přívod vzduchu.
- Tento výrobek vytváří mlhu. Neumísťujte zvlhčovač přímo na dřevěný nábytek, podlahu nebo jakýkoli povrch, který by mohl být poškozen vodou. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození pokud jsou přístroje nesprávně umístěny.
- Nepoužívejte, pokud je zástrčka poškozená nebo uvolněná.
- Před plněním nebo čištěním jednotky se ujistěte, že je přístroj odpojen ze zásuvky.
- Jakmile je zvlhčovač zapojen do zásuvky, jednotku nenaklánějte ani s ní nepohybujte.
- Neodstraňujte nádržku na vodu, pokud je přístroj zapnutý.
- Nemanipulujte se zástrčkou, pokud máte mokré ruce.
- Napájecí kabel příliš neohýbejte, neotáčejte, netahejte za něj ani jej nepoškozujte.
- Neumísťujte přístroj na místo, kdy je produkce mlhy namířena přímo na nějaký předmět nebo osobu.
- Mlhu (páry vylučované z přístroje) neinhaluje přímo nad přístrojem ani nepijte vodu z nádržky.
- Nádržku na vodu nenaplňujte horkou nebo vroucí vodou.
- Nepoužívejte tento výrobek na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna, topení nebo radiátor.
- Pokud dojde k prasknutí nebo poškození nádržky na vodu, přístroj nepoužívejte.
- Nenechávejte produkt běžet déle než 12 hodin.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel a vylijte vodu z nádržky.
- K čištění přístroje nelze používat jakékoliv dezinfekční prostředky nebo chemikálie.

- Přístroj neplňte vodou skrz 360° difuzor (obr. A) a ani otvorem pro výstup mlhy.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti jiných elektronických zařízení. Samozřejmě, mlží to!
- Během používání přístroj ničím nezakrývejte.
- Do nádrže na vodu nedávejte nic jiného než vodu nebo éterický olej.
- Přístroj je pouze pro domácí použití. Nepoužívejte venku.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel, jeho vhodným zajištěním minimalizujete možnosti úrazu. Napájecí kabel nepoužívejte, pokud jeví známky poškození.
- Pokud z nějakého důvodu přístroj přestane správně fungovat, využijte záruky.
- Tento výrobek není určen k použití dětem nebo osobám s omezenou fyzickou či duševní schopností, pokud nebyli poučeni o správném používání produktu, nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.



obrázek A




obrázek B


Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční vlny a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte příjem signálu, anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte přístroj do zásuvky na jiném okruhu, než je připojen přijímač.
- Obratě se na společnost Fridababy LCC nebo požádejte o pomoc kvalifikovaného technika.


INSTRUKCE:

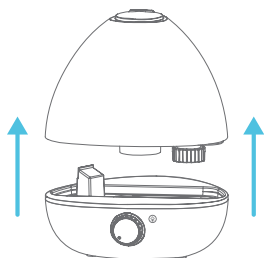


1. Zvedněte nádržku na vodu ze základny.

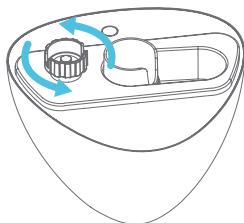


2. Odšroubujte uzávěr nádržky proti směru hodinových ručiček.

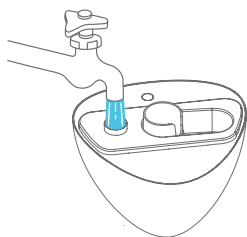


3. Naplňte nádržku vodou. Pro lepší výkon používejte filtrovanou nebo destilovanou vodu.

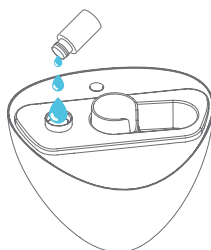


4. Podle potřeby přidejte pár kapek éterického oleje (volitelné).

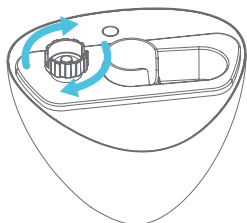


5. Zašroubujte víčko ve směru hodinových ručiček.

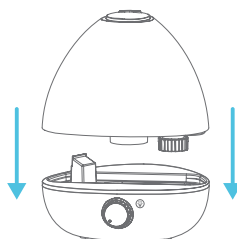

6. Umístěte vodní nádržku zpět na základnu.

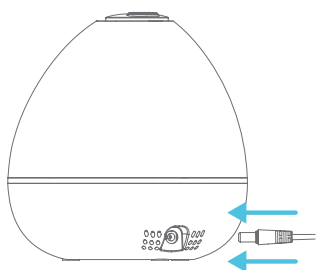


7. Zapojte napájecí kabel do základny.

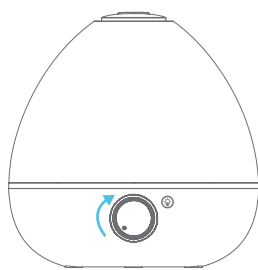


8. Otočením spínače ve směru hodinových ručiček přístroj zapnete a nastavíte intenzitu mlžení.

- Otočte ovladač do polohy ON a zvlhčovač vzduchu začíná pracovat.
- Dalším otočením ovladače upravíte intenzitu mlhy od minima do maxima.

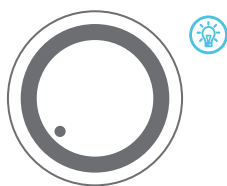


9. Klepnutím na ikonu žárovky zapnete noční světlo s měnícími se odstíny. Dalším klepnutím můžete zvolit vhodný odstín světla. Dalším klepnutím noční světlo vypnete.

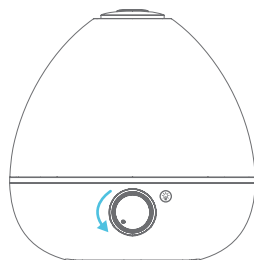

10. Otočením ovladače proti směru hodinových ručiček do polohy OFF zvlhčovač vypnete.

ČIŠTĚNÍ:

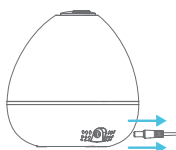

PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY ODPOJTE PŘÍSTROJ OD NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU.

UVNITŘ PŘÍSTROJE: Vylijte z nádržky přebytečnou vodu.


Podle potřeby jednotku omyjte čistou vodou pomocí kartáčku a měkkého hadříku. Neponořujte jednotku do vody.

NÁDRŽKA NA VODU: Vyprázdněte nádržku na vodu. Vyjměte rozprašovač a vyčistěte výstup mlhy vodou a měkkým kartáčem (doporučíme kartáč na čištění lahví).

VNĚJŠÍ POVRCH: V případě potřeby otřete povrch přístroje měkkým vlhkým hadříkem. Pokud si během používání všimnete, že se na povrchu sráží více vody, upravte intenzitu mlhy a vnější povrch osušte hadříkem.

VNITŘNÍ ČÁSTI PŘÍSTROJE:

1. Odpojte zvlhčovač.
2. Vyjměte nádržku a vylijte veškerou vodu v základně i z nádržky na vodu.
3. Snímač ve vnitřním středu základny otřete měkkým hadříkem.

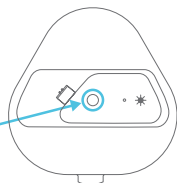

HLUBŠÍ ČIŠTĚNÍ + ODVÁPŇENÍ:

Tvrdost vody je velmi variabilní. K optimalizaci výkonu jednotky může být nutné čištění a odstranění vodního kamene každý týden nebo každý druhý týden. Pokud máte problémy odstranit vodní kámen, postupujte podle následujících pokynů.

1. V šálku smíchejte 1 lžici bílého octa a 1 lžici vody.
2. Ponechte roztok odstát 5 minut.
3. Nalijte směs do základny, nechte chvíli působit a poté očistěte všechny vnitřní povrchy měkkým hadříkem nebo kartáčkem.
4. Zkontrolujte 360° difuzor a trubici pro průchod mlhy. A dle potřeby očistěte.
5. Důkladně opláchněte základnu vodou, abyste odstranili zbytky vodního kamene a octového roztoku.

USKLADNĚNÍ:

- Pokud nebude zvlhčovač delší dobu používat, vyčistěte ho dle pokynů k čištění a odstraňování vodního kamene.
- Před uskladněním zvlhčovač zcela vysušte. NEUCHOVÁVEJTE se zbytky vody uvnitř základny nebo vodní nádrže.
- Zabalte jednotku do původní krabice a uložte ji na chladném a suchém místě.

INFORMACE O POUŽITÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ:

Používání éterických olejů je skvělý způsob, jak zvýšit účinek zvlhčovače. Řiďte se, prosím, doporučeními k používání éterických olejů, abyste nepoškodili přístroj nebo sebe.

- Do vody přidejte pár kapek kvalitního aromaterapeutického esenciálního oleje.
- Esenciální oleje mohou aplikovat pouze dospělí. Nedovolte dětem, aby je používaly bez dozoru.
- Po každém použití nádržku na vodu důkladně umyjte a odstraňte zbytky olejů.
- Nádržka na vodu a její víčko jsou vyrobeny z materiálů odolných éterickým olejům. Další součásti přístroje mohou být přímým kontaktem s olejem poškozeny. Olej neaplikujte mimo vodní nádržku.
- Éterický olej nenanášejte přímo na pokožku, nepožívejte jej.
- Pokud olej přijde do přímého kontaktu s pokožkou, omyjte ji vodou. Při požití oleje okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Udržujte oleje mimo dosah očí. Dojde-li ke kontaktu, okamžitě je vypláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
- Pokud se při používání přístroje s éterickým olejem necítíte dobře, zařízení ihned vypněte.
- Těhotné ženy, starší lidé, malé děti nebo lidé s chronickým onemocněním mohou být na vůně citlivější. Pokud se necítí dobře, okamžitě přístroj přestaňte používat.
- Esenciální oleje skladujte na tmavém chladném místě s těsným uzavíratelným víčkem a mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte kvalitní éterické oleje s platným datem expirace.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD:

POKUD VÁŠ ZVLHČOVAČ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pára a vlhkost se nevytvářejí:	Zkontrolujte napájecí adaptér – odpojte kabel od zvlhčovače a znovu zapojte. Ujistěte se, že není výpadek elektřiny. Zkontrolujte, zda je nádržka správně připojena. Zkontrolujte povrch snímače – při znečištění jej otřete pomocí měkké látky.
Fouká vzduch, ale vodní mlha se netvoří:	Přebytek vody – uberte z nádržky šálek vody. Pokud máte doma tvrdou vodu, zkuste použít destilovanou. Špinavá nádržka – vymyjte nádržku a zkuste znovu uvést do provozu. Špinavý snímač – otřete snímač měkkým hadříkem. Nádrž na vodu není správně připojena k základně – umístěte nádrž na základnu tak, aby mezi nádrží a základnou nebyla žádná mezera.
Úroveň vlhkosti je nízká:	Povrch snímače je špinavý – otřete snímač měkkým hadříkem. Voda v jednotce je příliš studená – vyměňte ji.
Mlha zapáchá:	Špatná údržba nebo znečištěná voda – důkladně vyčistěte nádrž + podstavec a naplňte nádržku čerstvou vodou.
Na nedalekém nábytku se tvoří bílý prach:	Tvrdá voda může vytvářet částice podobné prachu. Pokud vás to obtěžuje, použijte destilovanou vodu.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zvlhčovač přestal pracovat:	Málo nebo žádná voda – odpojte přístroj a doplňte nádrž.
Voda se objevuje mimo přístroj :	Prostor je nasycen vlhkostí, nastavte nižší intenzitu mlžení. Přístroj nestojí na rovině. Odpojte jej od elektrické sítě a umístěte na zcela rovný povrch. Neměl by být v těsné blízkosti předmětů nebo osob. Přístroj by měl být umístěn ve výšce 0,5–1 metr od podlahy.
Při doplňování kape voda:	Uvolněný uzávěr – uzávěr utáhněte až na doraz ve směru hodinových ručiček.
Vyšší hluchost:	Přístroj není umístěn na rovném a tvrdém povrchu. Ujistěte se, že nestojí na měkkém nebo savém povrchu.
Modré světlo třikrát bliká:	Indikuje nedostatek vody – odpojte a znovu naplňte nádrž.
Při stisknutí tlačítka ovládání světla nereaguje:	Nádržka na vodu není správně připojena k základně – umístěte nádržku na základnu správně, aby mezi nádrží a základnou nebyla žádná mezera. Napájecí adaptér není správně připojen – odpojte a znovu zapojte adaptér do přístroje i do zásuvky.

LIKVIDACE: Ekologickou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovávat přírodní zdroje a snížíte negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávné likvidace odpadů.

Další informace si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

DÝCHEJ ZLEHKA, BABY.

Máte další dotazy?
info@profimed.cz

fridababy®