



Přípravek určený k péči o pomůcky ústní hygieny – zubní kartáčky, kelímky, ústní sprchy aj.

ELIMINACE BAKTERIÍ • ČIŠTĚNÍ • ODVÁPŇENÍ

Ve vlhkém prostředí jako například v zubních kartáčích, ústních sprchách, kelímcích na zubní kartáčky, inhalačních maskách, se rády usidlují nejrůznější bakterie. Proto by se měly tyto pomůcky pravidelně a důkladně čistit.

Další známý problém je tvrdost vody. Nejen u automatických praček a kávovarů, ale i u všech přístrojů a předmětů, které přicházejí do styku s tvrdou vodou, se musí pravidelně odstraňovat vodní kámen. Pravidelné odvápnění je velmi důležité pro funkčnost a životnost předmětu či přístroje.

Redesept® byl speciálně vyvinut pro čištění, eliminaci bakterií a odvápnění ústních sprch, zubních kartáčků a jiných pomůcek. Tyto vlastnosti byly vědecky testovány. Streptococcus Mutans a Candida Albicans (ta se vyskytuje dokonce na více než polovině všech zubních kartáčků) jsou dva nejvíce rozšířené a nebezpečné druhy bakterií. Dle studií byla u Redeseptu prokázána vysoká účinnost v eliminaci těchto bakterií.

- **Čištění:** Redesept® obsahuje vedle čistících substancí také aktivní kyslík, který zvyšuje a urychluje čistící účinek.
- **Eliminace bakterií:** Vědeckým výzkumem bylo dokázáno, že přípravek Redesept® zničí během 10 minut veškeré bakterie Streptococcus Mutans a Candida Albicans.
- **Odstranění vodního kamene:** Redesept® důkladně odvápní ústní sprchy, zubní kartáčky, výměnné hlavice k elektrickým kartáčkům, výměnné trysky k ústním sprchám a jiné pomůcky ústní hygieny.

Použití:

- Do nádoby nasypete jednu odměrku Redeseptu = 10 g (u ústních sprch nasypete prášek přímo do nádržky), poté nádobu naplňte vlažnou vodou 200 ml (cca 40° C) a důkladně zamíchejte.
- Předměty, které zamýšlíte vyčistit, vložte do nádoby na dobu 30 minut.
- U ústních sprch zapněte krátce přístroj, aby se roztok prášku dostal do vnitřního systému a ponechte jej působit několik hodin. Poté ústní sprchu nebo vyčištěné předměty důkladně propláchněte čistou vodou. Pokud ponecháte Redesept působit déle, lze i přes noc, zvýšíte tím účinek.

Výše uvedené pomůcky doporučujeme čistit za pomoci přípravku **Redesept®** jedenkrát měsíčně, obzvláště když jste je po delší dobu nepoužívali (dovolená apod.).

Upozornění:

- **Redesept®** používejte pouze k čištění přístrojů a jiných pomůcek ústní hygieny.
- Vyčištěné předměty důkladně propláchněte pod tekoucí vodou (obzvláště zubní kartáčky).
- Vyvarujte se kontaktu prášku se sliznicí nebo očima.
- Uchovávejte výrobek v suchu, chladu a mimo dosah dětí. Chraňte výrobek před dětmi!

Složení:

Amidosulfonová kyselina, alkalický polyfosfát, jedlá soda, peroxid draselný, monohydrát preboritanu sodného, kyselina citronová, laurylsulfát sodný, oxid křemičitý, modré pigmenty, mátová silice.

Redesept® je ochranná známka společnosti intersanté GmbH, Bensheim/Germany

Výhradní dovozce a distributor: **PROFIMED s.r.o., Ječná 2, 120 00 Praha 2, www.profimed.cz, e-mail: info@profimed.cz**